

Unique latexmentes óvszer – Használati utasítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg!

Fontos információk

A Unique óvszerek abban különböznek a hagyományos óvszerektől, hogy egy új, szintetikus anyagból (AT-10) készültek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek az óvszerek nem olyan rugalmasak, mint a latexóvszerek.

Tárolás

Az óvszerek száraz, hűvös helyen tartandók, távol a direkt napfénytől. Hőségnek ne tegye ki őket! Felhasználhatóak a kártyán feltüntetett időpontig.

Síkosítók használata


A latexóvszerekkel ellentétben a Unique bármilyen típusú síkosítóval – olajtartalmúak is – használható. Amennyiben a pénisz vagy a hüvely területe gyógyszeres kezelés alatt áll, az óvszer használatáról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Az intim testékszerek használata nagyban növeli az óvszer károsodásának kockázatát!

Használat



1. Győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről és ellenőrizze a lejárat dátumot. Óvatosan húzza le a zárócímkét, ügyeljen arra, hogy az óvszert ne sértse fel.

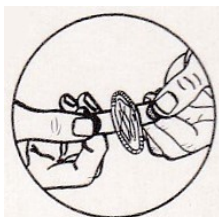


2. Óvatosan vegye ki az óvszert és forgassa úgy a kezében, hogy a PULL feliratú címkék felfelé nézzenek.



3. Tekerje le egy kissé az óvszert és tegye az erekált pénisz hegyére.



4. Húzza le az óvszert a két fogantyú segítségével a pénisz jobb és bal oldalán, míg a fogantyúk maguktól le nem válnak az óvszerről. Ha szükséges, húzza tovább az ujjával a pénisz tövéig.

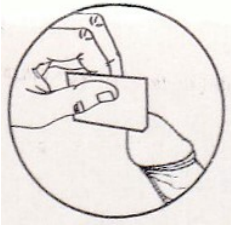

5. Javasoljuk síkosító használatát a nagyobb élmény és komfortérzet fokozása érdekében. A Unique óvszer nagyon vékony, ezért alig érezhető.



6. Ejakuláció után görgesse le az óvszert a péniszről, amikor már nem áll testi kontaktusban partnerével. A pénisz kihúzásakor tartsa szorosan a pénisz tövéénél az óvszert, hogy elkerülje az óvszer lecsúszását.



7. A használt óvszert helyezze a kommunális hulladékba, semmiképp se a wc-be! Gondoskodjon róla, hogy az óvszer zárt hulladéktartályba kerüljön.

Fertőzések és terhesség elkerülése

Nem létezik 100%-os biztonságú megelőző módszer, ami biztosan megakadályozza a szexuális úton terjedő betegségeket vagy a terhességet. Ugyanakkor az óvszerek a legmegbízhatóbb megelőző eszközök egyike. A további fogamzásgátló módszerekről és megelőző eszközökről érdeklődjön kezelőorvosánál.

Gyártó: Innova Quality S.A.S. (Kolumbia), Cra. 19a #196-23, Bogotá. Európai felelős disztribútor: Adloran Ltd., 483 Green Lanes, London N 13 4 BS

Forgalmazó: HoMe Kreatíva Kft. (www.hormonmentes.hu), 2133 Sződliget, Kossuth u. 5.