

TULIPA MENSTRUÁCIÓS KEHELY – TERMÉKINFORMÁCIÓ ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Tulipa menstruációs folyadék felfogására szolgáló hüvelyi segédeszköz.

Figyelem! Ne használja a Tulipa kelyhet a használati utasítás elolvasása és értelmezése előtt. Ez a használati útmutató nem helyettesíti az orvosi konzultációt. Amennyiben egészségügyi vagy nőgyógyászati problémái vannak, a Tulipa használata előtt konzultáljon kezelőorvosával! Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!

Használat. Tisztítsa meg a Tulipa menstruációs kelyhet minden használat előtt, valamint mosson kezet alaposan!

Hajtogatás és felhelyezés. Hajtsa össze a menstruációs kelyhet (1. ábra), és vegyen fel egy kényelmes testhelyzetet.

Óvatosan helyezze a menstruációs kelyhet a hüvelyébe. A Tulipa kelyhet nem szükséges olyan mélyre helyezni, mint egy tampont. A hüvely alsó részén helyezkedjen el, úgy, hogy a fogó ne lógjon ki a hüvelyből (2. ábra). Amennyiben a fogó túl hosszú, le lehet vágni belőle igény szerint. Amint elengedi az összehajtott kelyhet a hüvelyben, kinyílik és a megfelelő pozícióban marad a kialakuló vákuumnak és a hüvelyizmoknak köszönhetően.

Tipp: az ujjával tapintsa ki a kehely aljánál, hogy valóban teljesen kinyílt-e a hüvelyben.

Eltávolítás. A vérzés erősségétől függ, hogy a Tulipa kehely mennyi ideig van a hüvelyben. Javasolt 4 óránként kivenni, kiüríteni, folyó víz alatt megtisztítani, majd visszahelyezni.

FONTOS! 8 óránál hosszabb ideig sosem szabad a hüvelyben hagyni a kelyhet!

A menstruációs kehely aljának finom megnyomásával kioldható a vákuum. Ezután a kelyhet óvatosan ki lehet húzni a hüvelyből (3. ábra).

Tisztítás. A Tulipa menstruációs kelyhet meleg vízzel és szappannal szükséges tisztítani (4. ábra). Az első használat előtt, valamint minden menstruációs ciklus után fertőtlenítsen forró vízben: helyezze egy nagy edénybe a kelyhet, és forralja néhány percig. Ügyeljen rá, hogy az eszköz forralás közben ne érjen a forró edény aljához vagy széléhez!



Méretezés. A Tulipa menstruációs kehely két méretben hozzáférhető.

- **1-es méret:** 15 ml. Magasság: 70 mm, szélesség: 40,7 mm.
- **2-es méret:** 20 ml. Magasság: 70 mm, szélesség: 47 mm.

Tárolás. Tisztítás után szárítsa meg alaposan a kelyhet, majd tárolja a hozzá tartozó tokban.

Tárolhatósági idő. Megfelelő használat és rendszeres tisztítás mellett a Tulipa menstruációs kehely akár 10 évig is használható. Ezután a normál háztartási hulladékba dobható.

Elővigyázatossági figyelmeztetés: információ a toxikus sokk szindrómáról (TSS). Amennyiben egy menstruációs kehely 24 óránál tovább marad a hüvelyben, ez növelheti a baktériumok elszaporodásának esélyét, ami toxikus sokk szindrómához (TSS) vezethet – egy ritka, de súlyos állapothoz. A toxikus sokk szindróma tünetei hirtelen jelentkeznek, és az alábbiak lehetnek:

- hirtelen fellépő, magas láz (39 °C vagy magasabb),
- hányinger, hányás és/vagy hasmenés,
- szédülés, bőrkiütés (napégéshez hasonló),
- gyengeség, fáradtság, izom- és/vagy ízületi fájdalom,
- vörös szemek,
- torokfájás.

Ha a fenti tüneteket tapasztalja, távolítsa el a menstruációs kelyhet, és azonnal forduljon orvoshoz. Mondja el a tüneteit, valamint azt, hogy menstruációs kelyhet használ.

A Tulipa menstruációs kehely további kiemelendő tulajdonságai:

- BPA- és szilikonmentes,
- illatanyagmentes,
- biokompatibilis,
- vegán.

A Tulipa menstruációs kehely anyaga orvosilag jóváhagyott hőre lágyuló műanyag elasztomer (TPE). A tok anyaga: polipropilén (PP).

Figyelmeztetés! A Tulipa menstruációs kehely intim segédeszköz, a csomagolás kibontása után a törvény nem teszi lehetővé az áru visszavételét. Minden értékesítés végleges.

GYÁRTÓ	FORGALMAZÓ
KESSEL Medintim Gmbh. (Németország), 64546 Mörfelden-Walldorf, Kelsterbacher Straße 28.	HoMe Kreatíva Kft. Hormonmentes.hu 2133 Sződliget Kossuth Lajos u. 5. info@hormonmentes.hu