



## **MISTER SIZE MÉRETEZETT ÓVSZER – HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

1. Óvatosan tépje le a fóliát, ügyelve arra, hogy ne sértse meg a gumióvszert.
2. A fóliából történő eltávolítás során figyeljen arra, hogy a körmök, ékszerek stb. ne sértsék meg az óvszert.
3. Óvatosan nyomja össze a gumióvszer végét a hüvely- és mutatóujjai között, hogy kinyomja a levegőt az óvszer spermiumtartályából, miközben a merev pénisz makkjára helyezi. A nem kívánt terhesség és szexuális úton terjedő betegségek megelőzése érdekében az aktus megkezdése előtt szükséges ezt elvégezni.
4. Miközben tartja kezével a gumióvszer csúcsát, másik kezével görgesse le az óvszert a merev pénisz teljes hosszán.
5. Ellenőrizze, hogy az óvszer nem túl laza vagy túl szoros-e, ami esetleges szakadáshoz vezethet.
6. Az ejakulációt követően az óvszer peremét fogja meg és így húzza ki lassan a péniszt, hogy az óvszer ne csússzon le.
7. A péniszről lassan lecsúsztatva távolítsa el a gumióvszert. Fontos, hogy ezután a pénisz vagy a használt óvszer ne érintkezzen a hüvellyel.
8. Csomagolja össze a használt óvszert, majd dobja a szemetesbe.

### **FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÓVSZER HASZNÁLATA ELŐTT**

1. Ha további síkosításra van szükség, használjon víz alapú síkosítót.
2. **NE HASZNÁLJON OLAJ ALAPÚ SÍKOSÍTÓT**, mivel gyengítheti, károsíthatja a gumióvszer anyagát! Ez vonatkozhat néhány helyi alkalmazású gyógykészítményre is, amit a pénisz vagy a hüvely területén szükséges alkalmazni. Bizonytalanság esetén feltétlenül konzultáljon kezelőorvosával vagy gyógyszerésszel.
3. Ne használja az óvszert, ha a gumi anyaga ragacsos vagy repedezett, vagy ha a spermiumtartály láthatóan sérült.
4. A lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 72 órán belül kérjen orvosi segítséget, ha az óvszer aktus után szivárog, vagy aktus közben elszakadt.



5. A gumióvszerek kizárólag egyszeri használatra szolgálnak, az újra felhasznált óvszer nem véd megfelelően a nemkívánt terhességtől és a fertőzések kockázatától.
6. Az óvszer helyes használata segít megelőzni a nem kívánt terhességet, valamint a HIV/AIDS és más szexuális úton terjedő fertőző betegségek átvitelének kockázatát.
7. Semmilyen fogamzásgátló módszer nem biztosít 100%-os védelmet a nem kívánt terhesség, illetve a HIV és STIC átvitele ellen. Ha gyanítja, hogy Ön vagy partnere teherbe esett vagy megfertőződött, azonnal forduljon kezelőorvosához.
8. A termék természetes latexet tartalmaz, amely allergiás reakciókat, köztük anafilaxiás sokkot is okozhat. Ha Ön allergiás a természetes latexre és használta a terméket, forduljon kezelőorvosához!
9. Hűvös és száraz helyen tárolja az óvszert, ne tegye ki közvetlen napfénynek!
10. Gyermekektől tartsa távol az óvszert!
11. Az óvszer orális használata esetén fokozódhat a légszomj vagy fulladás kockázata.
12. Az óvszer használata kapcsán bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni szükséges a gyártónak és az adott ország illetékes hatóságának.
13. Az óvszer megfelel az ISO 4074/EN ISO 4074 nemzetközi szabványnak.