

## EMANUI – TERMÉKINFORMÁCIÓ, HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az Emanui egy tároló, tisztító és sterilizáló eszköz menstruációs kelyhekhez. Kiváló minőségű orvosi szilikonból készült. Kompatibilis a legnépszerűbb kelyhekkel: minden fogóval rendelkező eszközhöz használható. Környezetbarát és egészséges megoldás a menstruáció időszakában. Az FDA által jóváhagyott anyagokból készült, BPA-mentes, újrahasznosítható. Európai termék.

### Használat 1.: tisztítás nyilvános wc-ben

- **Töltsd fel az Emanui-t vízzel.** Mielőtt bemennél a wc-fülkébe, a mosdónál töltsd meg vízzel az Emanui-t a belső vonalig a teljes tisztítási folyamat érdekében. Ezután zárd le az eszközt. A kehely eltávolítása előtt akaszd fel az Emanui-t a fülkében található kabát-/táskatartó kis kampóra. Ha nincs ilyen akasztó a fülkében, akkor egyszerűen csak tartsd a kezdedben az eszközt.
- **Távolítsd el a menstruációs kelyhet.** Vedd ki a kelyhedet, majd ürítsd a tartalmát a wc-be. Ezután tedd bele a kelyhet az Emanui-ba – a kehely fogóját told be a 3 ágú tartóba, amilyen mélyen csak tudod. Ha a kehely fogója a helyén van, csavard rá a gyűrűt is a kehely teljes rögzítéséhez. Ezután a kezdet egy kis wc-papírral meg tudod tisztítani.
- **Zárd le az Emanui-t.** A kehely most már szorosan rögzítve van, így nyugodtan behelyezheted a vízbe, majd csavard rá az eszköz fedelét.
- **Tisztítsd meg a kelyhet.** Óvatosan nyomd össze az Emanui-t, a hüvelykujjadat helyezd a külső mélyedésbe a kehely teljes tisztításához. Finoman rázogathatod is az eszközt, hogy eltávolítsd az esetleges makacsabb menstruációs szövetdarabkákat.
- **Ürítsd ki az Emanui-t.** Nagyjából 1 perces tisztítás után nyisd ki a kis narancssárga kupakot, és öntsd ki a vizet a WC-be.
- **Nyisd ki az Emanui-t.** Ha minden vizet kiöntöttél az eszközből, kinyithatod. Ezután újra használhatod a menstruációs kelyhedet, vagy visszateheted az Emanui-ba.

### Használat 2.: sterilizálás

- **Első lépés.** Töltsd fel vízzel az Emanui-t a belső vonalig (ugyanúgy, mint tisztításnál). Told mélyen a kelyhet a 3 ágú tartóba.
- **Csavard rá a szorítógyűrűt.** Ha a kehely szára a helyén van (a 3 ágú tartóban), csavard rá a gyűrűt is a kehely teljes rögzítéséhez.
- **Zárd le Emanui-t.** A kehely most szorosan rögzítve van, így behelyezheted a vízbe, majd csavard rá az eszköz fedelét.
- **Mielőtt betennéd a mikróba.** Fontos, hogy mikrózás előtt mindenképpen nyisd ki a kis narancssárga kupakot! Ez biztosítja, hogy a sterilizálási folyamat közben keletkező gőz távozni tudjon az eszközből.
- **Sterilizálás.** Tedd az Emanui-t – nyitott kupakkal! – az üres mikróba. **Három perc és maximális teljesítmény** (de nem több, mint 1200W!) – ennyire van csupán szükség a káros baktériumok és kórokozók elpusztításához.
- **Várj, és kész!** Várd ki a 3 percet, amíg a sterilizálási folyamat zajlik. Közben gőz távozik az eszközből, ami teljesen normális jelenség. Nyisd ki a mikrót, és óvatosan vedd ki az Emanui-t egy pár sütőkesztyű segítségével (mivel ilyenkor még meglehetősen meleg). A menstruációs kelyhed sterilizálása befejeződött, készen áll a következő használatra!

Fizikai jellemzők: 10,5 cm x 6,8 cm

GYÁRTÓ	FORGALMAZÓ
She is Lucid Sp. z o.o. (Lengyelország) Łowicka 58/10 02-531, Varsó <a href="https://emanui.com/">https://emanui.com/</a>	HoMe Kreatíva Kft. Hormonmentes.hu 2133 Sződliget Kossuth Lajos u. 5. <a href="mailto:info@hormonmentes.hu">info@hormonmentes.hu</a>