

Ormelle női óvszer (5 db) – Használati utasítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg!

Az Ormelle női óvszer prémium minőségű latexből készül. Védelmet nyújt a nemkívánt terhesség és a szexuális úton terjedő fertőzések – köztük a HIV/AIDS – ellen.

Kezdetben némi gyakorlást igényelhet a termék megfelelő használata. Érdemes kísérletezni, mely testhelyzet a legkényelmesebb az óvszer felhelyezéséhez. Amennyiben kissé kényelmetlennek érzi a belső gyűrűt, ellenőrizze, hogy az óvszer elég mélyen a hüvelyben van-e.

Soha ne használjon sérült és/vagy lejárt óvszert. Minden alkalommal új, bontatlan terméket használjon. Az óvszer aktus közbeni elszakadása/sérülése esetén a lehető leghamarabb – legfeljebb 72 órán belül – forduljon szakorvoshoz. Konzultáljon orvosával/gyógyszerészével az esetlegesen helyileg alkalmazott gyógyszeres készítmények kompatibilitásával kapcsolatban. Az óvszer ne érintkezzen semmilyen olajjal, mert károsíthatja az anyagát. Szükség esetén kizárólag vízbázisú síkosítót alkalmazzon. Semmilyen barrier módszer nem nyújt 100%-os védelmet a nemkívánt terhesség, valamint a szexuális úton terjedő betegségek ellen.

Az alábbi – kifejezetten női óvszerre jellemző – körülmények csökkenthetik a termék hatékonyságát:

- az óvszer kicsúszik/elmozdul aktus közben
- a pénisz túlzottan betolja az óvszert a hüvelybe
- a pénisz félretolja az óvszert, így a hüvelyfal mellett jut be a hüvelybe
- az óvszer belső gyűrűje nem kerül elég mélyre a hüvelyben.

Alkalmazás

1. Kézmosás után vegyen ki egy Ormelle óvszert a tasakból. Figyeljen rá, hogy ne sértse meg a körmével, ékszerrel, ollóval, fogakkal vagy bármilyen éles eszközzel.
2. A külső gyűrű – ami a hüvelybemenetet takarja – nagyobb, mint a hüvely belső oldalára kerülő gyűrű. A kisebb belső gyűrű a behelyezés megkönnyítését és az óvszer hüvelyben való rögzülését szolgálja.
3. Mutató- és hüvelykujjával Ön vagy partnere formáljon nyolcas alakot a belső gyűrűvel, vagy nyomja össze a gyűrű két oldalát.
4. Vegyen fel egy kényelmes testhelyzetet (guggoló/fekvő helyzet, vagy az egyik lábat felemelve), majd tolja be a belső gyűrűt a hüvelybe, amilyen mélyre csak lehetséges. Szükség esetén a mutatóujjat az óvszer belsejébe tolva az óvszer még mélyebbre helyezhető. Az óvszer akkor van megfelelő helyen, ha a külső gyűrű takarja a hüvelybemenetet. Ügyeljen rá, hogy a pénisz a külső gyűrűn át hatoljon a hüvelybe (tehát ne mellette, az óvszer és a hüvelyfal között).
5. Amennyiben úgy érzi, az óvszer elmozdul/kicsúszik aktus közben, álljon meg és ellenőrizze. Ejakulációt követően a péniszt húzza ki a hüvelyből, a női óvszert a hüvelyben hagyva.
6. Használat után az óvszert fogja meg a külső gyűrűnél, csavaró mozdulattal zárja el az ejakulátumot, majd óvatosan húzza ki az óvszert a hüvelyből és dobja ki.

Ellenjavallat: latexallergia esetén ne használja a terméket!

Tárolás: hűvös és száraz helyen, közvetlen napfénytől védve!

Csomagolás: 5x1 db. Névleges szélesség: 74 mm (± 2 mm)

Megfelel az ISO 25841 nemzetközi szabványoknak, valamint rendelkezik CE 2460 jelöléssel.

EURÓPAI FORGALMAZÓ	FORGALMAZÓ
Adloran Ltd. (Németország) Gewerbegebiet 5 D-06577 An der Schmücke, OT Oldisleben	HoMe Kreativa Kft. – Hormonmentes.hu 2133 Sződliget Kossuth Lajos u. 5. info@hormonmentes.hu