

## Skyn latexmentes óvszer – Használati utasítás

### **Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg!**

Ez az óvszer Skynfeel-ből, a legmodernebb technológiát megtestesítő, természetes latexet nem tartalmazó anyagból készült, amely lágy és kellemes érzetének köszönhetően szinte alig észrevehető. Természetes színű, spermazsákkal ellátott, síkosított, illatosított óvszer. A termék szintetikus poliizoprénből készül, ezért a latexre allergiás személyek is használhatják.

Az óvszer helyes használatával csökkenthető a terhesség, a HIV/AIDS és más nem úton terjedő betegségek kockázata, ugyanakkor nincs 100%-os védelmet nyújtó fogamzásgátlási módszer.

### **Alkalmazás**

1. Nyissa fel a csomagolást és óvatosan vegye ki az óvszert. Az óvszer anyaga ellenálló, de az éles köröm, fog vagy ékszer károsíthatja.
2. Mindig használjon óvszert bármilyen szexuális érintkezés előtt. Ezáltal csökkenthető a nemkívánt terhesség és a nemi úton terjedő betegségek kockázata.
3. Az óvszer csak az egyik irányba tekerhető le. Használat előtt ne tekerje le teljesen az óvszert. Ellenőrizze, hogy az óvszer a helyes irányban áll-e.
4. Szorítsa össze az óvszer végét, hogy kinyomja a benne lévő levegőt és helyet csináljon az ejakulátumnak. Az óvszerbe szorult levegő növelheti az óvszer kiszakadásának kockázatát.
5. Tekerje le az óvszert a pénisz tövéig. Ha úgy érzi, hogy az óvszer csúszkál vagy túlságosan feszül, ellenőrizze az esetleges szakadás elkerülése érdekében.
6. Ne használjon olaj alapú síkosítót – pl. masszázsolajat, testápolót, babaolajat, vazelint stb. –, mert az olajat tartalmazó anyagok károsíthatják a poliizoprén óvszereket. Csak vízbázisú síkosítót használjon. Egyes helyileg alkalmazott gyógyszerkészítmények is károsíthatják az óvszert, ezért mindig konzultáljon az orvosával vagy gyógyszerészével.
7. Az aktus után óvatosan húzza ki a még merev péniszt. Fogja meg az óvszer gyűrűjét a hímvessző tövénél, nehogy kifolyjon az ejakulátum. A péniszt lefelé fordítva óvatosan húzza le az óvszert.
8. Kösse el a használt óvszer végét, és tekerje egy papírsebkendőbe, majd dobja ki. Ne húzza le az óvszert a wc-n.

**Az óvszert csak egyszer szabad felhasználni.** Az óvszer újrafelhasználásával járó veszély pl. a keresztfertőzés, szakadás, a síkosítás és tartósság romlása a tisztítás következtében, amely mind növeli a terhesség és a nemi úton terjedő betegségek kockázatát.

Az óvszer helyes használatával csökkenthető a terhesség, a nemi úton terjedő betegségek és a HIV/AIDS kockázata. Az óvszer nem vaginális használata növeli a lecsúszás vagy szakadás kockázatát. Ha nem biztos az alkalmazott fogamzásgátlási mód eredményességében, a lehető leghamarabb, de legkésőbb 72 órán belül vegye fel a kapcsolatot az orvosával. Az orvostechikai eszköz használata kapcsán bekövetkezett bármely súlyos incidens a gyártónak és a lakhely szerinti ország illetékes hatóságának jelenthető be.

**Ellenjavallat:** A különösen érzékeny személyeknél a poliizoprén óvszerek anyaga allergiás reakciót okozhat.

**Tárolás:** Hűvös és száraz helyen, közvetlen napfénytől védve!

Mindig ellenőrizze az óvszer csomagolására nyomtatott lejárat dátumot. Ha a dátum már letelt vagy a fólia láthatóan sérült, ne használja az abban levő óvszert.

EURÓPAI FORGALMAZÓ	FORGALMAZÓ
<b>Adloran Ltd. (Németország)</b> Gewerbegebiet 5 D-06577 An der Schmücke, OT Oldisleben	<b>HoMe Kreatíva Kft. – Hormonmentes.hu</b> 2133 Sződliget Kossuth Lajos u. 5. info@hormonmentes.hu